

# JUNIOR ClinSin med

Készlet az orr- és a melléküregek öblítésére

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel azok a termék megfelelő használatával kapcsolatos fontos információkat tartalmaznak.

A ClinSin med junior vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz.

Tartsa meg a használati útmutatót, hogy szükség esetén újra elolvashassa. Bármilyen kérdés felmerülése esetén konzultáljon orvosával, gyógyszerészével.

A ClinSin med junior orvostechnikai eszköz egy készlet, amely 1 flakont és 16 tasak felforralt vízben oldható port tartalmaz az orr- és melléküregek öblítésére, tisztítására, ápolására, megelőzési célra, valamint orr- és melléküreg műtét utáni tünetek kezelésére.

Ez az orvostechnikai eszköz az alábbi esetekben használható:

- arcüreggyulladás,
- különböző eredetű nátha (allergia és fertőzés),
- orr- és melléküreg műtét beavatkozások előtt és után,
- magas portartalmú vagy nagyon száraz levegő esetén,
- száraz orrmagkahártya esetén az orr gyógyszeres kezelése után,
- az orr- és melléküregek megfelelő higiéniájának fenntartására.

ClinSin med junior orvostechnikai eszköz izotóniás (fiziológiás) és hipertóniás (magas sótartalmú) oldat készítésére egyaránt alkalmas. Az izotóniás oldat természetes módon tisztítja meg az orrot a felgyülemlett allergénektől, baktériumoktól és vírusoktól. A tisztításon kívül a hipertóniás oldat össze is húzza a nyálkahártyát fertőzések, allergiák (orrfolyás, szénanátha), arcüreggyulladás és a melléküregekben felhalmozódott váladék esetén.

## HASZNÁLAT MÓDJA:

Izotóniás (fiziológiás) alkalmazásra 1 tasak készítményt kell feloldani 120 ml felforralt meleg, de már nem forró vízben.

A hipertóniás (magas sótartalmú) oldat készítéséhez 2 tasak készítményt kell feloldani 120 ml felforralt meleg, de már nem forró vízben.

A ClinSin med junior orvostechnikai eszköz 4 év feletti gyerekek esetében alkalmazható. Az eszközt felnőtt felügyelete mellett kell használni.

Naponta egyszer vagy kétszer kell öblíteni az orr- és melléküregeket, legalább egy órával a szabad levegőre való kimenetel (amennyiben a külső hőmérséklet 19°C-nál alacsonyabb), ill. lefekvés előtt.

**Izotóniás (fiziológiás) oldat** – 1 tasak tartalmát szórja a flakonba, tölts meg felforralt (már nem forró) meleg vízzel, amíg a 120 ml jelzést eléri. A flakont zárja le a kupakkal, majd az ujjával fedje le a kupak tetején lévő nyílást, és addig rázogassa, amíg egy tiszta oldat keletkezik. Azután az oldattal előbb az egyik orrnyílást (az oldat egyik felével), azután a másikat (az oldat másik felével) öblítse.

**Hipertóniás (magas sótartalmú) oldat** – 2 tasak tartalmát szórja a flakonba, majd tölts meg felforralt (már nem forró) meleg vízzel, amíg a 120 ml jelzést eléri. A flakont zárja le a kupakkal, majd az ujjával fedje le a kupak tetején lévő nyílást, és addig rázogassa, amíg egy tiszta oldat keletkezik. Azután az oldattal előbb az egyik orrnyílást (az oldat egyik felével), azután a másikat (az oldat másik felével) öblítse.

Enyhe, égető érzés jelentkezhet az orr öblítése után.


A ClinSin med junior egy újrafelhasználható orvostechnikai eszköz. Az orr- és a melléküregek öblítése után, a flakont és a feltétjét folyó vízzel gondosan meg kell tisztítani, és meg kell szárítani.

Csak a készletben található flakont használja az öblítéshez. Ha a flakon eltörik vagy deformálódik, illetve három havi használat után újra kell cserélni.


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

**FIGYELMEZTETÉS** – csak az eredeti és tiszta flakonnal szabad öblögetni (minden használat után a feltéttel együtt alaposan meg kell tisztítani a fertőzés elkerülése érdekében).


I. Szórja 1 tasak tartalmát (izotóniás oldat készítéséhez) vagy 2 tasakot (hipertóniás oldat készítéséhez) a flakonba, tölts meg felforralt (de már nem forró) meleg vízzel, amíg eléri a 120 ml jelzést.

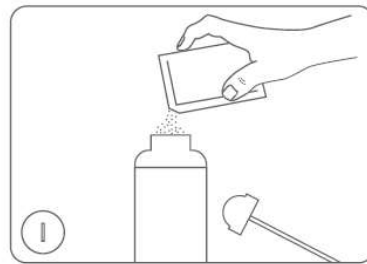


II. Zárja le precízen a flakont, fedje le az ujjával a feltétlen lévő nyílást, és rázogassa a tartályt tiszta oldat keletkezéséig.

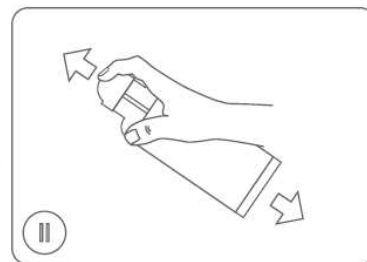

III. Hajoljon mosdókagyló vagy egy mosdótól fölé, és száján át történő könnyed légzés közben helyezze az egyik orrnyílásba a flakon feltétjét, majd nyomja össze óvatosan a flakont, hogy az oldat 50%-a bejusson az orrnyílásba. (Ne nyomja össze a másik orrnyílást, mivel annak nyitva kell maradnia, hogy a víz és a különböző váladékok távozhassanak az orrból.) Az oldat másik 50%-t a másik orrnyílásba alkalmazza, és ismételje meg az előbbi teljes eljárást. **NE NYELJE LE AZ OLDATOT!!!**

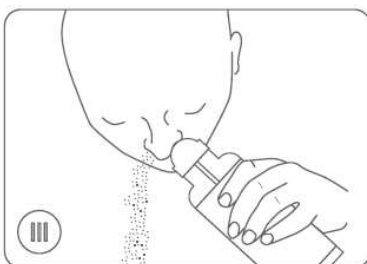

IV. Mindkét orrnyílás öblítése után fújja ki az orrát, és eldobható zsebkendővel törölje meg. Öntse ki a maradék oldatot. Minden öblítés előtt készítsen új oldatot.

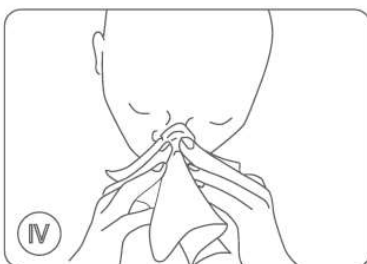

## ÖSSZETEVŐK:

Minden ClinSin med junior tasak 1,08 g nátrium-kloridot tartalmaz.

## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Ne használja, ha allergiás a hatóanyagra. Nem szabad a készletet használni teljesen eldugult orr, orrsérvnyferdülés, fülfertőzés esetén.

Orrműtéten átesett betegek esetében a készlet használata előtt konzultálni kell a kezelőorvossal. Ne öblögesse az orrát vagy a melléküregeket forró vagy nem felforralt csapvízzel. Ne használja a lejáratú idő után.

## HOL ÉS HOGYAN KELL A TERMÉKET TÁROLNI:

Gyermekek elől elzárva tartandó. Eredeti csomagolásban tárolandó, fénytől és nedvességtől védve. Tartsa be a tárolási körülményeket. Ne használja a lejáratú idő után. A lejáratú idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

**FIGYELMEZTETÉS:** Száraz helyen tárolja. Ne tárolja úgy, hogy a feltét a tartályon van. Ne tárolja a nedves alkatrészeket műanyag zacskóban. Ne használja a flakont, ha sérült vagy nem eltávolítható elszíneződések találhatók rajta. A károsodások elkerülése érdekében ne tegye a flakont, a feltétet és a csövet forrásban lévő vízbe.

## KÖLCSÖNHATÁSOK:

Nem ismertek.

## ORVOSI BALESETEK:

Nem jeleztek balesetet megfelelően használt készlet esetében.

## VÁRATLAN ESEMÉNYEK JELENTÉSE

Az orvostechnikai eszközre vonatkozó minden váratlan eseményt jelenteni kell a gyártó és a hatóság részére, melynek az elérhetősége: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Postafiók 450.

H-1372 Budapest

Honlap: [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu)

elérhetőségeken keresztül.

## Csomagolás tartalma:

1. ClinSin med junior orr- és melléküreg-öblítő készlet 4 év feletti gyerekek számára orröblítő flakontól és 16 db oldatkészítésre alkalmas portartalmú tasakból (1,08 g/db) áll.

2. A ClinSin med junior utántöltő az orr- és melléküregek öblítéséhez 4 év feletti gyerekeknek 30 darab oldatkészítésre alkalmas portartalmú tasakból (1,08 g/db) áll.

Orvostechnikai eszköz



## Gyártó:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.  
ul. Podstoczysko 30  
07-300 Ostrów Mazowiecka  
Polska

## Forgalmazó:

Naturprodukt Kft.  
2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8  
[www.naturprodukt.hu](http://www.naturprodukt.hu)

Szimbólumok a csomagoláson:



Gyártási szám



Lejáratú idő



Gyártó



Olvassa el a használati útmutatót!



Előírt tárolási hőmérsékleti tartomány  
Tárolási hőmérséklet 15°C - 25°C között



Orvostechnikai eszköz

A Használati útmutató első kiadásának dátuma: 2016. 09.

A Használati útmutató utolsó frissítésének dátuma:  
2021. 05.- 2. kiadás

Az orvostechnikai eszköz használati útmutatója és címkézése megfelel a gyártó által az eszközzel együtt nyújtott tájékoztatósi követelményeknek, amint azokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) tartalmazza.