

ClinSin med

Készlet az orr- és a melléküregek öblítésére

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mivel azok a termék megfelelő használatával kapcsolatos fontos információkat tartalmaznak.

A ClinSin med vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz. Tartsa meg a használati útmutatót, hogy szükség esetén újra elolvashassa. Bármilyen kérdés felmerülése esetén konzultáljon orvosával, gyógyszerészával.

A ClinSin med orvostechnikai eszköz egy készlet, amely 1 flakont és 16 tasak felforralt vízben oldható port tartalmaz az orr- és melléküregek öblítésére, tisztítására, ápolására, megelőzési célra, valamint orr- és melléküreg műtét utáni tünetek kezelésére.

Ez az orvostechnikai eszköz az alábbi esetekben használható:

- arcüreggyulladás,
- különböző eredetű nátha (allergia és fertőzés),
- orr- és melléküreg műtét beavatkozások előtt és után,
- magas portartalmú vagy nagyon száraz levegő esetén,
- száraz orrnyálkahártya esetén az orr gyógyszeres kezelése után,
- az orr- és melléküregek megfelelő higiéniájának fenntartására.

ClinSin med orvostechnikai eszköz izotóniás (fiziológiás) és hipertóniás (magas sótartalmú) oldat készítésére egyaránt alkalmas. Az izotóniás oldat természetes módon tisztítja meg az orrot a felgyülemlett allergénektől, baktériumoktól és vírusoktól.

A tisztításon kívül a hipertóniás oldat össze is húzza a nyálkahártyát fertőzések, allergiák (orrfolyás, szénanátha), arcüreggyulladás és a melléküregekben felhalmozódott váladék esetén.

HASZNÁLAT MÓDJA:

Izotóniás (fiziológiás) alkalmazásra 1 tasak készítményt kell feloldani 240 ml felforralt meleg, de már nem forró vízben.

A hipertóniás (magas sótartalmú) oldat készítéséhez 2 tasak készítményt kell feloldani 240 ml felforralt meleg, de már nem forró vízben.

A ClinSin med orvostechnikai eszköz felnőttek és 12 év feletti gyerekek esetében alkalmazható.

Naponta egyszer vagy kétszer kell öblíteni az orr- és melléküregeket, legalább egy órával a szabad levegőre való kimenetel (amennyiben a külső hőmérséklet 19°C-nál alacsonyabb), ill. lefekvés előtt.

Izotóniás (fiziológiás) oldat – 1 tasak tartalmát szórja a flakomba, töltse meg felforralt (már nem forró) meleg vízzel, amíg a 240 ml jelzést eléri. A flakont zárja le a kupakkal, majd az ujjával fedje le a kupak tetején lévő nyílást, és addig rázogassa, amíg egy tiszta oldat keletkezik. Azután az oldattal előbb az egyik orrnyílást (az oldat egyik felével), azután a másikat (az oldat másik felével) öblítse.

Hipertóniás (magas sótartalmú) oldat – 2 tasak tartalmát szórja a flakomba, majd töltse meg felforralt (már nem forró) meleg vízzel, amíg a 240 ml jelzést eléri. A flakont zárja le a kupakkal, majd az ujjával fedje le a kupak tetején lévő nyílást, és addig rázogassa, amíg egy tiszta oldat keletkezik. Azután az oldattal előbb az egyik orrnyílást (az oldat egyik felével), azután a másikat (az oldat másik felével) öblítse.

Enyhe, égető érzés jelentkezhet az orr öblítése után. A ClinSin med egy újrafelhasználható orvostechnikai eszköz. Az orr- és a melléküregek öblítése után, a flakont és a feltétjét folyó vízzel gondosan meg kell tisztítani, és meg kell szárítani.

Csak a készletben található flakont használja az öblítéshez. Ha a flakon eltörik vagy deformálódik, illetve három havi használat után újra kell cserélni.


A ClinSin med orvostechnikai eszközt várandós és szoptató kismamák is használhatják.

A ClinSin med orvostechnikai eszköz nem érinti az autózvezetési és gépek üzemeltetési képességeket.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

FIGYELMEZTETÉS – csak az eredeti és tiszta flakonnal szabad öblögetni (minden használat után a feltéttel együtt alaposan meg kell tisztítani a fertőzés elkerülése érdekében).

I. Szórja 1 tasak tartalmát (izotóniás oldat készítéséhez) vagy 2 tasakot (hipertóniás oldat készítéséhez) a flakomba, töltse meg felforralt (de már nem forró) meleg vízzel, amíg eléri a 240 ml jelzést.

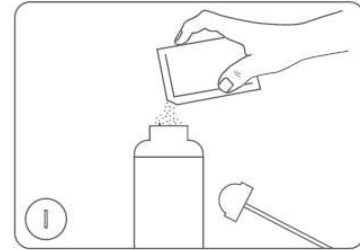

II. Zárja le precízen a flakont, fedje le az ujjával a feltétlen lévő nyílást, és rázogassa a tartályt tiszta oldat keletkezéséig.

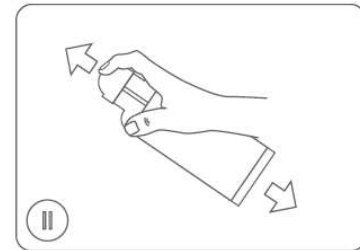


III. Hajlíjon mosdókagyló vagy egy mosdótál fölé, és száján át történő könnyed légzés közben helyezze az egyik orrnyílásba a flakon feltétjét, majd nyomja össze óvatosan a flakont, hogy az oldat 50%-a bejusson az orrnyílásba. (Ne nyomja össze a másik orrnyílást, mivel annak nyitva kell maradnia, hogy a víz és a különböző váladékok távozhassanak az orrból.) Az oldat másik 50%-t a másik orrnyílásba alkalmazza, és ismételje meg az előbbi teljes eljárást.

NE NYELJE LE AZ OLDATOT!!!



IV. Mindkét orrnyílás öblítése után fújja ki az orrát, és eldobható zsebkendővel törölje meg. Öntse ki a maradék oldatot. Minden öblítés előtt készítsen új oldatot.

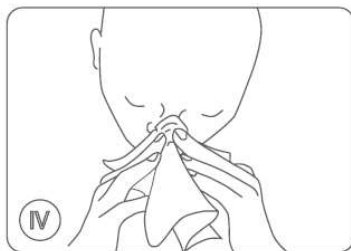

ÖSSZETEVŐK:

Minden ClinSin med tasak 2,16 g nátrium-kloridot tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK:

Ne használja, ha allergiás a hatóanyagra. Nem szabad a készletet használni teljesen eldugult orr, orrsérvnyferdülés, fülfertőzés esetén.

Orrműtéten átesett betegek esetében a készlet használata előtt konzultálni kell a kezelőorvossal. Ne öblögesse az orrát vagy a melléküregeket forró vagy nem felforralt csapvízzel. Ne használja a lejáratú idő után.

HOL ÉS HOGYAN KELL A TERMÉKET TÁROLNI:

Gyermekek elől elzárva tartandó. Eredeti csomagolásban tárolandó, fénytől és nedvességtől védve. Tartsa be a tárolási körülményeket. Ne használja a lejáratú idő után. A lejáratú idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

FIGYELMEZTETÉS: Száraz helyen tárolja. Ne tárolja úgy, hogy a feltét a tartályon van. Ne tárolja a nedves alkatrészeket műanyag zacskóban. Ne használja a flakont, ha sérült vagy nem eltávolítható elszíneződések találhatók rajta. A károsodások elkerülése érdekében ne tegye a flakont, a feltétet és a csövet forrásban lévő vízbe.

KÖLCSONHATÁSOK:

Nem ismertek.

ORVOSI BALESETEK:

Nem jeleztek balesetet megfelelően használt készlet esetében.

VÁRATLAN ESEMÉNYEK JELENTÉSE

Az orvostechnikai eszközre vonatkozó minden váratlan eseményt jelenteni kell a gyártó és a hatóság részére, melynek az elérhetősége: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Postafiók 450.
H-1372 Budapest
Honlap: www.ogyei.gov.hu
elérhetőségeken keresztül.

Csomagolások tartalma:

1. ClinSin med orr- és melléküreg-öblítő készlet 12 év feletti gyerekek és felnőttek számára orröblítő flakontól és 16 db oldatkészítésre alkalmas portartalmú tasakból (2,16 g/db) áll.

2. A ClinSin med utántöltő az orr- és melléküregek öblítéséhez 12 év feletti gyerekeknek és felnőtteknek - 30 darab oldatkészítésre alkalmas portartalmú tasakból (2,16 g/db) áll.



Orvostechnikai eszköz

Gyártó:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrow Mazowiecka
Polska

Forgalmazó:

Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8
www.naturprodukt.hu

Szimbólumok a csomagoláson:



Gyártási szám



Lejáratú idő



Gyártó



Olvassa el a használati útmutatót!



Előírt tárolási hőmérsékleti tartomány



Tárolási hőmérséklet 15°C - 25°C között



Orvostechnikai eszköz

A Használati útmutató első kiadásának dátuma: 2016. 09.

A Használati útmutató utolsó frissítésének dátuma:

2021. 05. - 2. kiadás

Az orvostechnikai eszköz használati útmutatója és címkézése megfelel a gyártó által az eszközzel együtt nyújtott tájékoztatási követelményeknek, amint azokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) tartalmazza.