

Használati útmutató - Kérjük, figyelmesen olvassa el!

DOLOR*git*
med

fülcsepp

Csökkenti a fájdalmat, a külső hallójárat
kipirosodását és viszketését. A külső
hallójárat gyulladásainál alkalmazható.



Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót, mert fontos tudnivalókat tartalmaz a termék alkalmazására vonatkozóan.

Ez az orvostechnikai eszköz vény nélkül kapható.

A lehető legjobb kezelési eredmény elérése érdekében a fülcseppet az előírásnak megfelelően kell alkalmazni.

Összetétel: Glicerín (99,5 %), pantenol, cetil-piridinium-klorid, víz.

Kiszerelés és tartalom:
10 ml oldat

Alkalmazási terület:

A külső hallójárat panaszainak (pl.: külső hallójárat gyulladás) kezelésére.

Megjegyzés:

A kezelendő panaszok mögött különböző okok állhatnak.
Ha 2 nappal az alkalmazást

követően nem tapasztalható javulás, orvoshoz kell fordulnia.

Ellenjavallat:

A fülcseppet nem szabad alkalmazni glicerinnel szembeni ismert érzékenység és dobhártya-sérülés (dobhártya-perforáció) esetén, vagy nyílt sebeknél.

Ne alkalmazza egyidejűleg a fülcseppet más helyileg ható gyógyszerekkel (pl.: fülcseppekkel vagy -kenőcsökkel).

Kölcsönhatás más szerekkel:

Nem ismert.

Mellékhatások: Nem ismert.

Óvintézkedések és különleges tudnivalók:

- A fül erős fájdalma esetén keresse fel orvosát.
- Ha 2 nappal az alkalmazást követően nem tapasztalható javulás, vagy a panaszok erősödnek, orvoshoz kell fordulnia.

**Mire kell figyelni
gyermeknél történő
alkalmazásnál?**

12 hónapon felüli gyermekek számára alkalmazható. A gyermekeknél történő alkalmazás előtt azonban kérje ki orvosa véleményét.

**Mire kell figyelni terhesség
és szoptatás alatt?**

Nincs olyan útmutatás, amely a terhesség és a szoptatás alatti alkalmazás ellen szól. Alkalmazás előtt azonban ajánlott kikérnie az orvos véleményét.

**Adagolás, az alkalmazás
módja és időtartama:**

A fülcseppet alkalmazás előtt kézbe fogva melegítse testhőmérsékletűre.

Amennyiben az orvos vagy a gyógyszerész másként nem javasolja, - cseppentsen 1–2 cseppet szükség szerint naponta legfeljebb 4x a hallójáratba.

Hajtsa a fejét oldalra és

cseppentse az oldatot a hallójáratba, miközben a műanyag flakont nyomja. Hagyja a fejét kb. 3 percig oldalfekvésben. Használat után gondosan zárja le újra a flakont. Az alkalmazási időtartammal kapcsolatban nincsenek korlátozások. A fülcseppet megelőzőként is lehet használni.

Eltarthatóság:

 A dobozon és a címkén megjelölt lejáratí idő után ne használja a fülcseppet.

Minőségét felbontás után 6 hétig őrzi meg.

**Gyermekektől elzárva
tartandó.**

 Tárolási hőmérséklet 25 °C alatt.

**Orvostechnikai
eszköz**



A tájékoztató lezárásának ideje: 2015. június

Gyártja:



Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10, D-66424 Homburg/Németország

Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8
www.naturprodukt.hu