

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót, mivel fontos információkat tartalmaz a termék helyes használatára vonatkozóan.

A SFORSIN Horkolás elleni spray egy orvostechnikai eszköz, mely vény nélkül kapható.

Az optimális hatás elérésének érdekében kövesse a használati útmutató utasításait.

Tartsa meg a használati útmutatót, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Ha további kérdése lenne, forduljon orvosához vagy gyógyszerészehez.

SFORSIN

Orvostechnikai eszköz Horkolás elleni spray 20 ml

1. Milyen készítmény a SFORSIN Horkolás elleni spray orvostechnikai eszköz és mire alkalmazható

A SFORSIN egy torokra alkalmazható spray formájú orvostechnikai eszköz, amely lehetővé teszi az orrgaratban és a felső légutakban a levegő áramlását.

AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

A termék összetevői a szájüregbe történő befújáskor fessestítik és egyidejűleg hidratálják a torok hátsó részében található rezgő szöveteket.

Az összetevők be is vonják a torok lágy szöveteit és segítenek csökkenteni vagy megszüntetni a horkoló hangot.

A torokban alvás közben a lágy szövetek lazák és rezegnek, ami a legtöbb esetben a horkolás közvetlen oka. A SFORSIN összetevői aktívan hidratálják és fessestítik a szöveteket a torok hátsó részénél, a nyelvénél és a nyelvcsapnál, ezáltal csökkentik a lágy szövetek rezgését, és az ehhez társuló hangot.

A SFORSIN akár 8 órán keresztül is enyhíti a horkolást, ezáltal lehetővé teszi a nyugodt éjszakai alvást.

Az optimális hatás eléréséhez a terméket rendszeresen kell alkalmazni.

ÖSSZETÉTEL:

Víz, glicerín, nátrium-benzoát, poliszorbát 80, kálium-szorbát, nátrium-klorid, menta aroma, nátrium-hialuronát, hidroxietil-cellulóz, citromsav.

2. Fontos információk a SFORSIN orvostechnikai eszköz használatára előtt

Ellenjavallatok és javasolt óvintézkedések:

Nem alkalmazza a készítményt, ha allergiás a termék valamelyik összetevőjére.

A SFORSIN orvostechnikai eszköz nem kezeli az alvási apnoét (légzéskimaradás). Ha egyheti alkalmazást követően nincs észrevehető hatás, keresse fel orvosát, hogy kizárják a horkolás egyéb okait, beleértve a súlyos betegségeket is.

Terhesség és szoptatási időszak alatti alkalmazás:

A készítmény terhesség és a szoptatási időszak alatti alkalmazása előtt beszéljen orvosával vagy gyógyszerészeivel.

Kölcsönhatások:

Nem ismertek kölcsönhatások más termékekkel, orvosi vagy gyógyszeres kezeléssel, habár a termék alkalmazása előtt és utána nem szabad használni helyileg alkalmazott más készítményeket vagy folyadékokat.

Mellékhatások:

Nem ismert.

3. Hogyan kell alkalmazni a SFORSIN orvostechnikai eszközt

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat, hogy segíthessük Önt a SFORSIN orvostechnikai eszköz megfelelő használatában.

Higiéniai okokból a termék használata csak egy személy számára javasolt.

1. Rendszeres használata lefekvéskor ajánlott.
2. Evést és ivást követően kell alkalmazni.
3. Alkalmazása után legalább 1 órán keresztül ne fogyasszon semmilyen folyadékot!
4. Az alkalmazás során a flakont tartsa függőlegesen és az adagoló megnyomásával 3-4-szer permetezzen a torokba.
5. A megfelelő alkalmazást követően, érezhetően egy védőréteg alakul ki a torok teljes felületén (a terméknek be kell fednie a torok egész nyálkahártya felületét).

Lehetséges, hogy az első használat után még nem érezhető a hatás.



1.

RÁZZA FEL A FLAKONT



2.

VÍZSZINTESIG EMELJE FEL AZ ADAGOLÓCSÖVET, TÁVOLÍTSA EL A ZÁRÓKUPAKOT, ÉS AZ ADAGOLÓCSÖVET HELYEZZE A SZÁJÜREGBE



3.

PERMETEZZEN 3-4-SZER A TOROK HÁTSAÓ RÉSZÉ FELÉ

4. Ha a javasolt adagnál nagyobb adagot alkalmazott a SFORSIN orvostechnikai eszközből

Ne alkalmazzon a javasolt adagnál többet.

Nem jelentettek esetet a SFORSIN orvostechnikai eszköz túladagolásáról.

5. Súlyos váratlan esemény jelentése

Az orvostechnikai eszközre vonatkozó minden súlyos váratlan eseményt jelenteni kell a gyártó és a hatóság részére, melynek az elérhetősége:

Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet
Postafiók 450.
H-1372 Budapest
Honlap: www.ogyel.gov.hu

6. Hogyan tárolható a SFORSIN orvostechnikai eszköz

Gyermekektől távol tartandó!

Felbontás után hűtőszekrényben tárolandó és 21 napig használható fel.

Fénytől, fagytól védve tárolandó.

Ne használja a terméket a külső csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A használt vagy lejárt termékeket az adott országban alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Az orvostechnikai eszközöket és a maradékaikat nem szabad a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba dobni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt termékekkel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

7. Egyéb információk

Milyen a SFORSIN orvostechnikai eszköz külleme és mit tartalmaz a csomagolás

A SFORSIN spray színtelen, tiszta, folyadékot tartalmaz menta illattal.

Csomagolás:

20 ml folyadék feltétlenül ellátott flakonba töltve, használati útmutatóval együtt dobozban.

A használati útmutató első kiadásának dátuma: 2016.12.

A használati útmutató utolsó frissítésének dátuma: 2021.05. - 3. kiadás

Az orvostechnikai eszköz használati útmutatója és címkézése megfelel a gyártó által az eszközzel együtt nyújtott tájékoztatási követelményeknek, amint azokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) tartalmazza.



Gyártó:

Natur Produkt Zdravit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Varsó, Lengyelország

Forgalmazó:

Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8
www.naturprodukt.hu

Naturprodukt

Orvostechnikai eszköz



SZIMBÓLUMOK A CSOMAGOLÁSON:



Tárolási hőmérséklet



Gyártási szám



Lejárati idő



Használati útmutató



Orvostechnikai eszköz



Gyártó